



Ultrazvukový přístroj Clarius

Rychlá příručka










Popis uživatelského rozhraní

Ikony

Menu

Ikony Menu jsou navigační ovládací prvky v horní části obrazovky, které vás zavedou na požadovanou obrazovku.

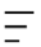



IKONY MENU








	Obrazovka výběru vyšetření.		Technické podpora + manuály.		O aplikaci (verze softwaru atd.).
	Obrazovka výběru sondy.		Obrazovka nastavení.		Odhlášení uživatele.
	Zobrazení menu.		Přehled ukončených vyšetření poslaných na uložení.		Uložiště Clarius Cloud.

Nástroje

Tyto ikony jsou ovládací tlačítka, které provedou požadovanou akci, když je stisknete.

IKONY NÁSTROJE













	Vymazat zvolenou položku.		Uložit snímek.		Zmrazit/odmrazit živé zobrazení.
	Zpět na předchozí obrazovku.		Pro otočení/převrácení obrazu táhněte tuto ikonu vlevo/vpravo nebo nahoru/dolů.		Otevřít Clarius' Facebook stránky.
	Jdi na další obrazovku.		Chcete-li provést měření, ťukněte na tuto ikonu a zvolte měřicí nástroj.		Otevřít Clarius' Twitter stránky.
	Zobrazení políčka pro vyhledávání.		Měření vzdálenosti, ťukněte na dvě místa na snímku.		Otevřít Clarius' LinkedIn stránky.
	Smazání obsahu.		Měření dvou vzdáleností, ťukněte na dvě místa na snímku a pak to zopakujte pro druhou vzdálenost.		Otevřít Clarius' Instagram stránky.
	Potvrdit.		Měření obvodu obtahováním, táhněte prstem kolem oblasti zájmu.		Otevřít Clarius' Google Plus stránky.





	Zvětšení/zmenšení obrazu.		Měření obvodu pomocí kružnice, ťukněte na dvě místa na okraji oblasti zájmu.		Otevřít Clarius' YouTube stránky.
	Otevřít seznam nástrojů.		Pro zapnutí/vypnutí funkce auto-gain, ťukněte na tuto ikonu.		
	Uložit cineloop smyčku.		Zobrazit linii uprostřed živého zobrazení.		

Stavové ikony

Stavové ikony slouží pouze k zobrazení animovaných ukazatelů, které mohou měnit barvu. Tyto ukazatele zobrazují stav komponent přístroje.

STAVOVÉ IKONY

	Kvalita připojení k síti je dobrá. Žlutá, oranžová nebo červená barva indikuje různé stupně zhoršení kvality připojení.
	Bluetooth signál ze skeneru (sondy) je slabý, v pořádku nebo dobrý.
	Pro připojení je zvoleno Wi-Fi Direct.
	Pro připojení je zvoleno Wi-Fi.
	Aplikace Clarius Ultrasound čeká na vaši volbu (např. update firmwaru nebo výběr sítě).
	Skener (sonda), který jste zvolili, je nyní propojen s aplikací Clarius Ultrasound. Ťuknutím na tuto ikonu zobrazíte údaje SSID, Password, IP Address, a Listen Port.
	Skener (sonda) stahuje nový softwarový balík.
	Skener (sonda) aktualizuje software na nejnovější verzi. Během aktualizace nevytahujte baterii ze skeneru (sondy).
	Teplota skeneru (sondy) je v pořádku. Červená barva indikuje, že se zahřívá. Ťuknutím na tuto ikonu zobrazíte teplotu ve stupních Celsia.
	Stav baterie. Ťuknutím na tuto ikonu zobrazíte stav nabití baterie v procentech.
MI/TI	Mechanický index/teplotní index
	Obraz je zvětšený.
	Obraz je zmenšený.

	Funkce Auto-gain je zapnuta.
	Skener (sonda) je v módu spánku.
	Počet vyšetření čekajících na stažení do uložiště Clarius Cloud. Tyto snímky budou automaticky staženy na uložiště Clarius Cloud, jakmile se připojíte k internetu.
	Počet probíhajících (nedokončených) vyšetření.